

ナーセントクッションシリーズ

膝の屈曲による横倒れを防ぎたい方に



防水加工


ナーセントアップニー

アイ・ソネックス TAIS:00149-000009

(2個1セット)

月額レンタル料	2,000円
ご利用者負担	200円

肩や足部、脇や膝の圧迫を軽減したい方に

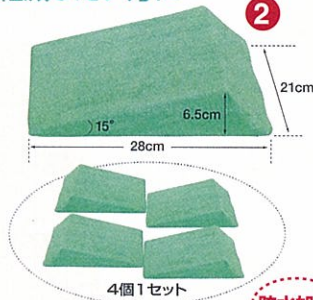

防水加工

ナーセントミニ

アイ・ソネックス TAIS:00149-000010

(4個1セット)

月額レンタル料	2,000円
ご利用者負担	200円

より快適で効果的なポジショニングのために、上手に組み合わせてください。

1+2+3または4
快適な安眠姿勢に
円背や下肢関節の屈曲抑制のために仰臥位姿勢がとれない方のリラクゼーションに最適です。
ベッドマットのみの接触圧データ
0+0+0使用時の接触圧データ

1+2+5
両膝の倒れと骨盤のツイスト予防に
膝の倒れを防止し、両膝や骨盤を正しい位置に保持します。仙骨部の圧迫にナーセントパットAの併用をお勧めします。

1+2+5
両膝の屈曲と股関節部の外転・外旋予防に
膝の外転を防止し、両膝や骨盤を正しい位置に保持します。仙骨部の圧迫にナーセントパットAの併用をお勧めします。

車いす+3
円背や滑りすわりで座位保持が困難な方に
身体をすっぽりと包み込むのでリラックスした座位姿勢が得られます。

車いす+2+3
滑りすわりや前かがみ姿勢の防止に
滑りすわりを予防するために、ナーセントミニを車いす前座に置き、ナーセントロールMを身体の前面と両脇を囲むようにしてご使用ください。

2+3または4(+5)
側臥位姿勢の保持に
ナーセントロール1本で頭や肩中、股一帯までを快適に変えます。ナーセントミニと合わせてご使用ください。
ベッドマットのみの接触圧データ
0+0+0使用時の接触圧データ

円背や関節の拘縮で快適な姿勢保持が困難な方に



丸洗いOK

ナーセントロール

アイ・ソネックス

Mサイズ (直径15×長さ150cm)
TAIS:00149-000011

月額レンタル料	2,000円
ご利用者負担	200円

Lサイズ (直径20×長さ168cm)
TAIS:00149-000011

月額レンタル料	2,000円
ご利用者負担	200円

肩や足部、脇や膝の圧迫を軽減したい方に



ナーセントパットA

アイ・ソネックス TAIS:00149-000012

月額レンタル料	3,000円
ご利用者負担	300円

サイズ:(大ピース)400×400×100mm
(小ピース)200×400×100mm

症状に応じての多機能な使い方

- オムツ交換
パットを重ねて完全仰臥位に。清潔もオムツ交換も簡単!
- ベッド上の正しい座位姿勢に
正しい座位。体積の小さい方。腰上げておいてパットを膝にあてる。
- 下半身の外傷防止
気道確保
車いす上の姿勢保持

大・小の三角形だから組み合わせ自由自在! 症状に応じて合わせることができます。

半側臥位
1 体高を少し起こして... 2 簡単に差し込めるわ! 3 一度差し込んだら、寝返りしなくていいわ! 4 一度差し込んだら、寝返りしなくていいわ!

仰臥位
1 手が差し込めるくらいの手前がめいいく! 2 チェックポイント

ナーセントパット2ピース

アイ・ソネックス JAN:4560232691026

月額レンタル料	2,000円
ご利用者負担	200円

サイズ:200×400×100mm



ライトターン

アイ・ソネックス TAIS:00149-000017

- 排泄ケアの負担軽減に
- 下肢関節の拘縮や床ずれ防止にも
- スウィング機能でリハビリにも

月額レンタル料	3,000円
ご利用者負担	300円



体位変換時の使用方法

ライトターンを倒した状態で足を乗せます。 → ライトターンを回転させて起こします。 → ベルトと肩を持って押しながら寝返りを行います。 → 股間を開いた姿勢なのでおむつ交換や排便に最適です。

その他の使用例

① 下肢関節の拘縮や床ずれ防止。 ② おむつ交換を楽にするライトターン活用法。

ナーセントパットと併用でより快適な姿勢の安定につながります。 → ライトターンで寝返りをさせながら、おむつを腰の下に敷きこみます。 → 股間が開いているので、シワにならず気持ちよく装着することができます。



アスディス

モルテン TAIS:00054-000095

月額レンタル料	6,000円
ご利用者負担	600円

サイズ:本体/幅930×長さ1430mm
ポンプ/幅230×奥行185×高さ280mm
重量:本体/12.5kg ポンプ/5.5kg
電力:AC100V 50/60Hz 40W

- 畳の部屋での快適な離床動作を実現する起き上がり補助装置です。
- 布団からの起き上がりが困難な方、ベッドを好まない方、部屋が狭く大きなベッドが置けないなどに最適。
- エアによるやさしい動きで膝上げと背上げを連動して行うことで、姿勢の崩れ対策と、楽な姿勢を確保します。
- 折りたたむと畳半分のコンパクトサイズ。軽量で簡単に移動や収納ができるので、生活空間を有効に使えます。



膝上げ・背上げ連動機能

背は最大70°まで上がります

使用例 ※布団、マットレスは付属していません。

- トレイジー®はシート本体の素材が滑りのよいナイロンで、三層構造の中間層が上下層の動きに干渉されないため、上下左右、回転等の動作がわずかな力で可能になりました。




トレイジースライドシート

東レ TAIS:00947-000001

月額レンタル料	1,000円
ご利用者負担	100円

サイズ:幅750×長さ1200mm
素材:シート地/ナイロン

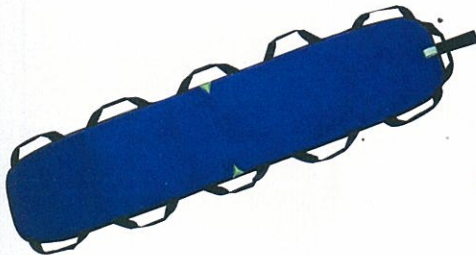

移乗ボード のせかえくん

TB-502 (Mサイズ) タカノ TAIS:00297-000045


月額レンタル料	2,500円
ご利用者負担	250円

サイズ:幅55×長さ172×厚さ1cm 重量:1100g
●表面は防水加工布

移乗ボード

- ベッドからの移乗時、抱きかかえたりすることなく引き寄せるだけで、安全・簡単に移乗できます。
- 介助者の腰痛予防など負担を軽減します。

(使用例)

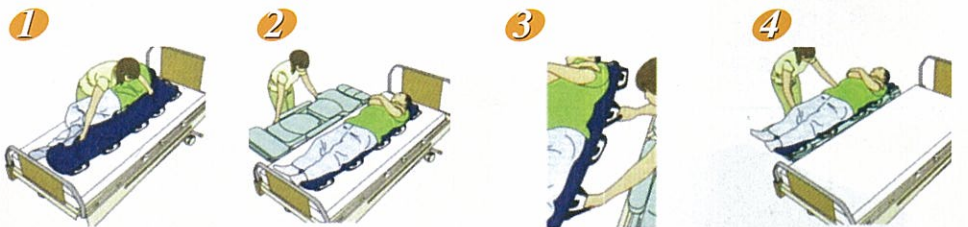

1 寝ている方を側臥位にして、移乗ボード“のせかえくん”をしきこみます。

2 ストレッチャー等をベッドに横付けし、ベッドの高さを調整し、ロックします。

3 移乗ボード“のせかえくん”の取っ手を2ヶ所持ちます。

4 取っ手をひきよせ、移乗させます。



モーリフトマルチトランス (旧:GSIリフト)

パシフィックサプライ JAN:4524491003891

月額レンタル料	3,000円
ご利用者負担	300円

サイズ:幅36×長さ117cm 重量:850g
●カバーは洗濯(60℃以下)、消毒用アルコール使用可能です。

ベッドの上での移動等に使用します

- 床からの対象者の持ち上げやベッド上での移動、移乗用具としても使用します。

(使用例)

ベッド上での上方への位置修正

●2人介助の場合



1 介助者は、それぞれの握り手を握って図のように、腰を捻らない作業姿勢で構えます。この時、脊柱は自然なカーブを保持し、膝は軽度屈曲状態で体重は前側の足にかかっています。



2 前側の足から、後側の足に体重を移動する事によって、対象者は、ゆっくりとベッドの上方に引き上がります。(腕力で引っ張って対象者を動かそうとしないでください)

●1人介助の場合



1 臀部(でんぶ)側の握り手に、適切な布を通して、一つにまとめて握り手を作り、しっかりと握ります。もう一方の手で、手前の肩側の握り手をもちます。



2 作業姿勢、作業技術は左図の(2人介助の場合)と同じです。

特殊寝台付属品 (マットレス)

サービスコード 171004

特殊寝台付属品
(マットレス)



レギュラー 90cm幅 TAIS:01148-000007
83cm幅 TAIS:01148-000005
ショート 90cm幅 TAIS:01148-000008
83cm幅 TAIS:01148-000006

Tフィットマットレス 快適ハード

豊田通商

月額レンタル料	2,000円
ご利用者負担	200円

サイズ:
レギュラー幅90×長さ191×厚さ7cm
幅83×長さ191×厚さ7cm
ショート幅90×長さ180×厚さ7cm
幅83×長さ180×厚さ7cm



KE-551Q TAIS:00170-000159
KE-553Q TAIS:00170-000142
KE-5511Q TAIS:00170-000286
KE-5531Q TAIS:00170-000285

プレグラーマットレス

パラマウントベッド

月額レンタル料	2,000円
ご利用者負担	200円

サイズ:
レギュラー (KE-551Q) 幅91×長さ191×厚さ8cm
(KE-553Q) 幅83×長さ191×厚さ8cm
ミニ専用 (KE-5511Q) 幅91×長さ180×厚さ8cm
(KE-5531Q) 幅83×長さ180×厚さ8cm
●背上げ、膝上げの動きに合わせて自由に曲がります。背上げの体のズレや胸・おなかへの圧迫感を軽減できます。



レギュラー TAIS:00167-000002
ショート TAIS:00167-000062
ロング TAIS:00167-000063

ダブルウェーブマットレス

MB2500L シーホネンス

月額レンタル料	2,000円
ご利用者負担	200円

サイズ:
(レギュラー) 幅90×長さ191×厚さ8cm
(ショート) 幅90×長さ181×厚さ8cm
(ロング) 幅90×長さ205×厚さ8cm
●垂直のウェーブは体重を支えるバネ性を水平のウェーブは体圧分散効果を生み出します。




レギュラー 90cm幅 TAIS:01148-000003
83cm幅 TAIS:01148-000001
ショート 90cm幅 TAIS:01148-000004
83cm幅 TAIS:01148-000002

Tフィットマットレス ソフト&ハード

豊田通商

月額レンタル料	2,500円
ご利用者負担	250円

サイズ:
レギュラー幅90×長さ191×厚さ8cm
幅83×長さ191×厚さ8cm
ショート幅90×長さ180×厚さ8cm
幅83×長さ180×厚さ8cm
●ハード面とソフト面が選べる1枚2役のリバーシブルタイプです。

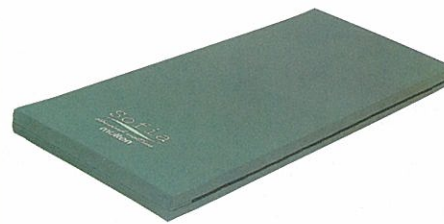

ソフィア (防水タイプ)

モルテン

月額レンタル料	3,000円
ご利用者負担	300円

サイズ:
レギュラー (MHA-1091) 幅91×長さ191×厚さ10cm
(MHA-1083) 幅83×長さ191×厚さ10cm
ショート (MHA-1091S) 幅91×長さ183×厚さ10cm
(MHA-1083S) 幅83×長さ183×厚さ10cm
●マットレスがやわらかいために、広く身体を支えることで荷重(体重)を分散し、圧迫力を減少させます。




TAIS:00563-000021 (A1R)
TAIS:00563-000019 (A3R)
TAIS:00563-000022 (A1S)
TAIS:00563-000020 (A3S)

アルファプラ すくっと (撥水・通気タイプ)

タイカ

月額レンタル料	3,000円
ご利用者負担	300円

サイズ:
レギュラー (TS-SKT-A1R) 幅91×長さ191×厚さ9cm
(TS-SKT-A3R) 幅83×長さ191×厚さ9cm
ショート (TS-SKT-A1S) 幅91×長さ183×厚さ9cm
(TS-SKT-A3S) 幅83×長さ183×厚さ9cm
●両端が硬いから立ち座りやすく、寝る位置はαGELの効果で心地よい。

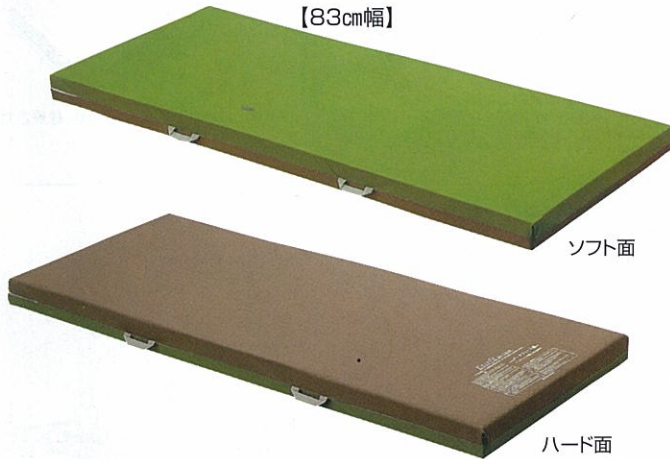

【83cm幅】

ソフト面

ハード面



【91cm幅】

ソフト面

ハード面

エバーフィットマットレス (リバーシブルタイプ)

撥水タイプ パラマウントベッド

月額レンタル料	3,000円
ご利用者負担	300円

サイズ:
KE-521Q (レギュラー) 幅91×長さ191×厚さ10cm TAIS:00170-000389
KE-523Q (レギュラー) 幅83×長さ191×厚さ10cm TAIS:00170-000390
KE-5211Q (ミニ) 幅91×長さ180×厚さ10cm TAIS:00170-000396
KE-5231Q (ミニ) 幅83×長さ180×厚さ10cm TAIS:00170-000397
●人の体のやわらかさに近づけたマットレス。

このマークのついた商品はお問い合わせください。



ピュアライフエアパッド

岡部商事 TAIS:00537-000003

月額レンタル料	2枚1組 5,000円
ご利用者負担	2枚1組 500円

サイズ:①幅83×長さ191×厚さ1.5cm
②幅91×長さ195×厚さ1.5cm
③幅100×長さ200×厚さ1.5cm
④幅100×長さ185×厚さ1.5cm

●立体編物がクッション性、湿潤拡散性、通気性などの優れた機能を持ち、湿潤とムシをおさえ、血行阻害と床ずれの発生を抑制します。●シミがつきにくく、吸汗・速乾性に優れているうえに、吸った汗を肌面に戻しにくくドライに保ちます。●敷くだけで、安全に、しかも継続的に布団内はもちろん、お部屋のニオイも消臭します。(約10畳)●高性能抗菌防霉ポリエステル繊維(SEK基準合格品)を使用しています。洗濯しても、抗菌効果は変わりません。●洗濯表示マークに従って、ご家庭で洗濯できます。

ハッピー そよかせ


ハッピーおがわ

月額レンタル料	5,000円
ご利用者負担	500円

サイズ:①幅83×長さ187×厚さ3cm TAIS:00747-000002
②幅91×長さ187×厚さ3cm TAIS:00747-000006

- 洗浄性:洗浄可能な構造により、ベッド周りを清潔に保ちます。
- 速乾性:水切り性抜群で、短時間で乾きます。
- 耐久性:50%繰り返し圧縮テスト8万回で、約95%の耐久性。
- 通気性:網状クッション構造により、湿度上昇を抑え蒸れにくく快適です。
- 環境性:ポリエステル100%素材で、リサイクル可能。
- 体圧分散性:ゴム弾性とコイルによる適度なクッション性により、適度な体圧分散を可能にしました。血流阻害による鬱血を防止します。

洗えるマットレス。
今までにない快適な寝心地をサポートします。
床ずれ防止と改善に効果を発揮します。

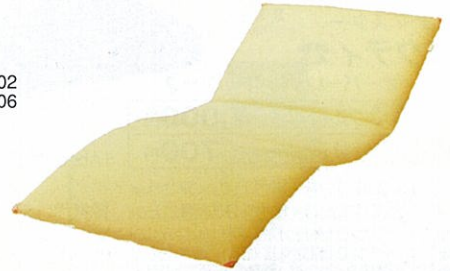


アルファプラ

タイカ

月額レンタル料	6,500円
ご利用者負担	650円

撥水・防水タイプ
91cm・スタンダード
TAIS:00563-000008
83cm・スタンダード
TAIS:00563-000005
91cm・ミニ
TAIS:00563-000011
83cm・ミニ
TAIS:00563-000010

αゲルと4層の特殊ウレタンフォームによる快適性

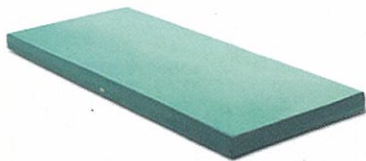


メディマット コンビ型

いわしや医療

月額レンタル料	9,000円
ご利用者負担	900円

91cm幅 TAIS:00678-000008
83cm幅 TAIS:00678-000007

サイズ:
①BF918 幅83×長さ191×厚さ8.5cm レギュラー
②BF918S 幅91×長さ181×厚さ8.5cm ショート
③BF838 幅100×長さ191×厚さ8.5cm レギュラー
④BF838S 幅100×長さ181×厚さ8.5cm ショート
●透湿性・防水性に優れたゴアライニングを採用。
●ムシが少なく、汚物は直接アルコール消毒すれば汚れも臭いも残りません。●床ずれ予防効果が高く、患部の乾燥を助け、改善に役立ちます。
●突起部を効果的に除圧し、極端な沈みも無く長時間快適に使用、体位変換などの介助作業が楽に行えます。

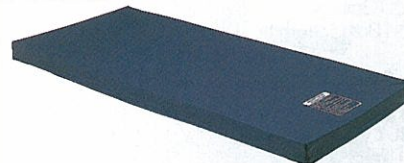

コンフォケアマットレス

バラマウントベッド

月額レンタル料	4,000円
ご利用者負担	400円

91cm幅 TAIS:00170-000257
83cm幅 TAIS:00170-000258

サイズ:
[KE-811] 幅91×長さ191×厚さ8.5cm
[KE-813] 幅83×長さ191×厚さ8.5cm
●上層は低反発ウレタンフォームで体圧分散効果を高め、下層は高弾力ウレタンフォームでしっかり身体を支持。底づきの予防と体圧分散機能を両立させました。●潤地(上面)は滑りが良く、摩擦抵抗を緩和する生地を使用し、体圧分散効果を損なわないようにたるみを設けています。
●前面のファスナーを挟んだ2重フラップ構造で、液体の侵入や細菌の侵入を防ぎます。
●潤地は耐久性・難燃性に優れ、背上げ・膝上げ時にベッド本体との滑りがスムーズな生地を採用しました。
●持ち運び用ハンドル、マットレス裏面四隅にシート止め付き。


3層式スライド構造

ナツソー

モルテン TAIS:00054-000091

月額レンタル料	6,500円
ご利用者負担	650円

①MNS83 幅83cm ②MNS83S 幅83cm(ショート)
③MNS91 幅91cm ④MNS91S 幅91cm(ショート)

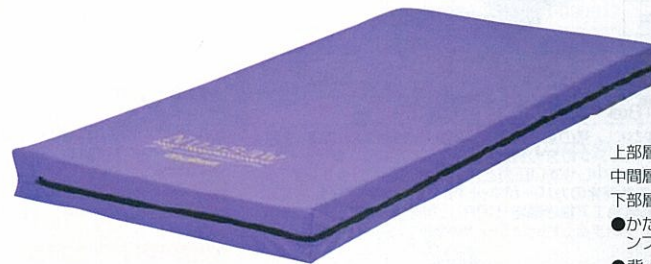

上部層:超やわらかめ
中間層:少しかため
下部層:やわらかめ
●かたさの異なる高密度ウレタンフォームの3層構造。
●背上げ時の背中にかかる苦しさを低減し、楽で安全な姿勢を実現。

アクアフロートマットレス

バラマウントベッド

月額レンタル料	6,000円
ご利用者負担	600円

91cmレギュラー(通気)
KE-841Q TAIS:00170-000507
83cmレギュラー(通気)
KE-843Q TAIS:00170-000508
91cmミニ(通気)
KE-8411Q TAIS:00170-000511
83cmミニ(通気)
KE-8431Q TAIS:00170-000512

- マットレス中央部に埋め込まれたアクアセル。
- 背上げたときに臀部(でんぶ)をやさしく包み込み、優れた体圧分散性能を発揮します。

